



Akuvax

Wyrób medyczny **Akuvax** to spray do uszu, który stosuje się u niemowląt powyżej 3. miesiąca życia, dzieci oraz osób dorosłych w celu usunięcia korków woskowinowych oraz zalegającej woskowiny. Spray do uszu jest pomocny przy chorobach ucha zewnętrznego oraz profilaktycznie w utrzymaniu higieny uszu i zapobieganiu powstawania korków woskowinowych.

UWAGA! To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Oliwa z oliwek
przygotowana według
standardów farmaceutycznych



Skład

Oliwa z oliwek przygotowana według standardów farmaceutycznych.

Stosowanie

W celu usunięcia korków woskowinowych oraz zalegającej woskowiny przy chorobach ucha zewnętrznego: niemowlęta powyżej 3. miesiąca życia, dzieci i osoby dorosłe – 3 naciśnięcia pompki dozującej 3 razy dziennie przez 5-7 dni.

Profilaktyczne stosowanie w celu utrzymania higieny uszu oraz zapobiegania powstawania korków woskowinowych: niemowlęta powyżej 3. miesiąca życia, dzieci i osoby dorosłe – 1-2 naciśnięcia pompki dozującej co 7 dni.

Środki ostrożności dotyczące używania

Nie należy stosować Akuvax:

- w przypadku nadwrażliwości lub alergii na oliwę z oliwek,
- w przypadku stwierdzonej lub podejrzewanej perforacji błony bębenkowej,
- po operacji ucha,
- w przypadku wycieku z ucha,
- przy bólu ucha,
- w przypadku podrażnienia, wysypki w uchu,
- gdy istnieją zawroty głowy,
- do innych otworów ciała, na przykład: do oczu, nosa lub jamy ustnej.

U niemowląt i dzieci do 12. roku życia stosować po konsultacji z lekarzem.

Nie należy manipulować zbyt głęboko aplikatorem, aby nie uszkodzić narządu słuchu.

Ze względów higienicznych zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę.

Przed zastosowaniem wyrobu medycznego Akuvax należy zapoznać się z instrukcją używania dołączoną do opakowania. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze od 10°C do 25°C w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować wyrobu medycznego po upływie 6 miesięcy od daty pierwszego użycia.

Wytworzono w Polsce.

Instrukcja używania wyrobu medycznego

Objętość netto:

- 15 ml