



## Akuvax

Wyrób medyczny **Akuvax** to spray do uszu, który stosuje się u niemowląt powyżej 3. miesiąca życia, dzieci oraz osób dorosłych w celu usunięcia korków woskowinowych oraz zalegającej woskowiny. Spray do uszu jest pomocny przy chorobach ucha zewnętrznego oraz profilaktycznie w utrzymaniu higieny uszu i zapobieganiu powstawania korków woskowinowych.

**UWAGA!** To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Oliwa z oliwek  
przygotowana według  
standardów farmaceutycznych



## *Skład*

Oliwa z oliwek przygotowana według standardów farmaceutycznych.

## *Stosowanie*

W celu usunięcia korków woskowinowych oraz zalegającej woskowiny przy chorobach ucha zewnętrznego: niemowlęta powyżej 3. miesiąca życia, dzieci i osoby dorosłe – 3 naciśnięcia pompki dozującej 3 razy dziennie przez 5-7 dni.

Profilaktyczne stosowanie w celu utrzymania higieny uszu oraz zapobiegania powstawania korków woskowinowych: niemowlęta powyżej 3. miesiąca życia, dzieci i osoby dorosłe – 1-2 naciśnięcia pompki dozującej co 7 dni.

## *Środki ostrożności dotyczące używania*

Nie należy stosować Akuvax:

- w przypadku nadwrażliwości lub alergii na oliwę z oliwek,
- w przypadku stwierdzonej lub podejrzewanej perforacji błony bębenkowej,
- po operacji ucha,
- w przypadku wycieku z ucha,
- przy bólu ucha,
- w przypadku podrażnienia, wysypki w uchu,
- gdy istnieją zawroty głowy,
- do innych otworów ciała, na przykład: do oczu, nosa lub jamy ustnej.

U niemowląt i dzieci do 12. roku życia stosować po konsultacji z lekarzem.

Nie należy manipulować zbyt głęboko aplikatorem, aby nie uszkodzić narządu słuchu.

Ze względów higienicznych zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę.

**Przed zastosowaniem** wyrobu medycznego Akuvax należy zapoznać się z instrukcją używania dołączoną do opakowania. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

## *Przechowywanie*

Przechowywać w temperaturze od 10°C do 25°C w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować wyrobu medycznego po upływie 6 miesięcy od daty pierwszego użycia.

Wytworzono w Polsce.

## *Instrukcja używania wyrobu medycznego*

### *Objętość netto:*

- 15 ml