



Collaflexin

Collaflexin to wyrób medyczny, 1 ampułkostrzykawka 2 ml.

Sól sodowa kwasu hialuronowego 1,6%.

Collaflexin zachowuje się jak substytut płynu maziowego stawów objętych osteoartrozą, wywołaną czynnikami mechanicznymi lub degeneracją stawów, powodującą bolesność i zmniejszoną ruchomość stawów.

Polecamy również inne produkty z serii [Collaflex](#). Wszystkie znajdziesz w naszym sklepie oleofarm24.pl.

UWAGA! To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



Collaflexin – ostrzeżenia i środki ostrożności

Przeczytaj załączoną do opakowania instrukcję używania.

Produkt może być stosowany wyłącznie przez doświadczony personel medyczny.

Po otwarciu, produkt musi być natychmiast użyty.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie używać, jeżeli:

- opakowanie wydaje się być naruszone,
- upłynął termin ważności,
- występuje pęknięcie lub uszkodzenie skóry.

Produkt nie jest przeznaczony do iniekcji donaczyniowej.

Nie wstrzykiwać poza jamę stawu, w tkankę lub do torebek stawowych.

Wyrób nie został przebadany pod kątem bezpiecznego stosowania u kobiet w ciąży i matek karmiących piersią.

Unikać jednoczesnego podawania z innymi produktami do stosowania wewnątrzstawowego, by wyeliminować ryzyko interakcji.

Nie stosować w przypadku:

- przy występowaniu obfitych wysięków śródstawowych,
- uczulenia na kwas hialuronowy oraz inne składniki preparatu,
- infekcji lub choroby skóry blisko miejsca wstrzyknięcia,
- infekcji obejmującej chorą część,
- silnego zapalenia chorej części.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego i mrozu.

Instrukcja używania wyrobu medycznego

Plik wygenerowany na stronie Oleofarm.pl