



Nosonek izotoniczny spray do nosa dla dzieci

Spray do nosa dla dzieci NOSONEK to woda morska, która pochodzi z **zatoki Cancale w Bretanii**, znanej z jakości swoich wód. Zatoka ta cechuje się wysokimi pływami (do 12 m) oraz silnymi prądami, zapobiegającymi zanieczyszczeniu wód. Dzięki tej wyjątkowej specyfice, woda cały czas oczyszcza się i pozostaje czysta.

Próbki pobiera się automatycznie, gdy jakość wody jest optymalna (2 godziny, 1 godzina przed i 0,5 godziny po okresie przepływu). Obszar pobierania próbek jest **obszarem klasy A** i podlega stałemu monitoringowi pod kątem mikrobiologicznym, zanieczyszczenia chemicznego, pH, fitoplanktonu itp.

UWAGA! To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



Nosonek spray do nosa dla dzieci to roztwór wody morskiej do codziennej higieny nosa, ułatwiający usunięcie wydzieliny i udrożnienie nosa. Do stosowania do każdego otworu nosowego w zależności od potrzeb.

Nosonek zapewnia ulgę w oddychaniu, dzięki formule zawierającej wysokiej jakości wodę morską. To produkt idealny do stosowania zarówno w domu, jak i w podróży.

Odpowiednia higiena nosa jest ważna dla niemowląt, dzieci i dorosłych. Zbyt duża ilość wydzieliny w jamach nosowych może prowadzić do namnażania się drobnoustrojów i nadmiernej suchości błony śluzowej nosa. Dzięki działaniu mechanicznemu, woda morską **Nosonek** intensywnie nawilża jamę nosową i ułatwia usunięcie wydzieliny, przywracając tym samym naturalną przepuszczalność błony śluzowej nosa.

Skład:

Woda morską, woda oczyszczona.

Wskazania:

Wodę morską Nosonek należy stosować w codziennej higienie nosa u niemowląt, dzieci i dorosłych. Przynosi ulgę w dolegliwościach, takich jak: zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, obturacyjne zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok przynosowych, suchość błony śluzowej nosa oraz w chrypce spowodowanej suchością błon śluzowych. Ponadto, działa pomocniczo w otolaryngologii i pediatrii.

Zalecenia:

U dzieci zaleca się stosowanie produktu w połączeniu z aspiratorem do nosa Noson.

Ostrzeżenia:

Przed rozpoczęciem stosowania produktu zapoznać się z treścią instrukcji używania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Produkt nie nadaje się do dalszego stosowania po upływie trzech miesięcy od pierwszego użycia.

Ulotka:

Producent

Pharmalink, S.L.

Av. Universitat Autònoma, 13

Parc Tecnològic del Vallès

08290 Cerdanyola del Vallès

Objętość netto:

- 120 ml

Plik wygenerowany na stronie Oleofarm.pl