



Nebusalin 3%

Nebusalin to sterylny roztwór hipertoniczny (3%) chlorku sodu w ampułkach do inhalacji. Nie do wstrzykiwań.

UWAGA! To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykieta.

The advertisement features a product box for Nebusalin 3% on the left and a photograph of a young child using a nebulizer on the right. The box is white and teal, with the brand name 'NEBUSALIN' in large teal letters and '3%' below it. It also mentions 'HIPERTONICZNY, 3% roztwór NaCl' and '30 ampułek do inhalacji o pojemności 4 ml'. The child is holding a white nebulizer mask to their face. A red button with the text 'KUP TERAZ >' is overlaid on the child's image. The background is dark blue with a pattern of white dots.

6/WM/2022

NEBUSALIN
3%

HIPERTONICZNY, 3% roztwór NaCl

30 ampułek do inhalacji
o pojemności 4 ml

KUP TERAZ >

WYRÓB MEDYCZNY

Hipertoniczny roztwór do nebulizacji

Sprawdź także serię **Nosonek**, która zawiera produkty z roztworem wody morskiej.

Wskazania

- pobudza usuwanie wydzieliny w dolnym odcinku dróg oddechowych na skutek osmotycznego działania,
- zapobiega wysychaniu śluzówki oskrzeli,
- roztwór hipertoniczny chlorku sodu może być stosowany z nebulizatorami pneumatycznymi lub ultradźwiękowymi. Nebulizatora należy używać zgodnie z instrukcją producenta dostarczoną z urządzeniem.

Postać i opakowanie

Opakowanie zawiera 30 jednodawkowych ampułek o pojemności 4 ml.

Skład

Chlorek sodu 3 g, woda oczyszczona QS 100 ml; nie zawiera konserwantów.

Środki ostrożności dotyczące używania

- wyłącznie do jednorazowego użytku,
- wyłącznie do inhalacji,
- nie do wstrzykiwania,
- przed użyciem należy sprawdzić, czy jednodawkowa ampułka nie została uszkodzona,
- nie używać uszkodzonej ampułki,
- postępować zgodnie z instrukcjami użytkownika producenta nebulizatora,

- w razie skłonności do rozwoju duszności lub nadwrażliwości nie wolno stosować roztworu inhalacji bez nadzoru lekarza,
- nie mieszać z innymi lekami,
- otwartych jednodawkowych ampułek nie wolno stosować ponownie: produkt nie zawiera konserwantów, dlatego ponowne użycie może wiązać się z ryzykiem podania zanieczyszczonego roztworu.

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Hipertoniczny 3% roztwór chlorku sodu do inhalacji jest wyrobem medycznym klasy IIa.

Wytwórca:

LABORATOIRE UNITHER

Espace Industriel Nord

151, Rue André Durouchez

CS 28028

80084 Amiens Cedex 2, FRANCJA

Ulotka

Opakowanie:

- 30 ampułek

Plik wygenerowany na stronie Oleofarm.pl