

NOSONEK

HIPERTONICZNY

ROZTWÓR WODY MORSKIEJ
SPRAY DO NOSA ŁAGODNY

HIPERTONICZNY ROZTWÓR WODY MORSKIEJ NOSONEK - SPRAY DO NOSA

Odpowiednia higiena nosa jest ważna dla niemowląt, dzieci i dorosłych. Zbyt duża ilość wydzieliny w jamach nosowych może prowadzić do namnażania się drobnoustrojów i nadmiernej suchości błony śluzowej nosa. Dzięki działaniu mechanicznemu, woda morska **NOSONEK** intensywnie nawilża jamę nosową i ułatwia usunięcie wydzieliny, przywracając tym samym naturalną przepuszczalność błony śluzowej nosa. Woda morska **NOSONEK** zachowuje dobroczynne właściwości naturalnej wody morskiej. Woda morska **NOSONEK** pochodzi z zatoki Cancale w Bretanii, znanej z jakości swoich wód. Zatoka ta cechuje się wysokimi pływami (do 12 m) oraz silnymi prądami, zapobiegającymi zanieczyszczeniu wód. Dzięki tej wyjątkowej specyfice, woda cały czas oczyszcza się i pozostaje czysta. Próbkę pobiera się automatycznie, gdy jakość wody jest optymalna (po okresie przypływu). Obszar pobierania próbek jest obszarem klasy A i podlega stałemu monitoringowi pod kątem mikrobiologicznym, zanieczyszczenia chemicznego, fitoplanktonu, pH, itp.).

Opakowanie:

Spray o pojemności 120 ml z aplikatorem do nosa.

Skład:

Woda morska, woda oczyszczona.

Wskazania:

Hipertoniczny roztwór wody morskiej **NOSONEK** – spray do nosa jest wyrobem medycznym przeznaczonym do stosowania u dzieci od 3. roku życia i dorosłych. Wyrób jest wskazany w infekcjach błon jamy nosowo-gardłowej, katarze, infekcjach zatok przynosowych oraz w chrapaniu spowodowanym suchością błon śluzowych. Hipertoniczny spray do nosa, dzięki swojemu działaniu osmotycznemu usuwa nadmiar wydzieliny z komórek błon śluzowych. Osmotyczne działanie roztworu umożliwia mechaniczne oczyszczenie i udrożnienie górnych dróg oddechowych oraz pozwala zmniejszyć obrzęk błon śluzowych. Wodę morską **NOSONEK** należy stosować w codziennej higienie nosa. Przynosi ulgę w dolegliwościach, takich jak: zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, nieżyt nosa, zapalenie zatok przynosowych, suchość błony śluzowej nosa oraz w chrypcie spowodowanej suchością błon śluzowych. Ponadto działa pomocniczo w otolaryngologii i pediatrii.

Sposób użycia:

1. Delikatnie włożyć końcówkę aplikatora do otworu nosowego.
 2. Nacisnąć dozownik.
 3. Poczekać aż roztwór rozredzi wydzielinę, po czym wydmuchać nos.
 4. Czynność powtórzyć dla drugiego otworu nosowego.
 5. Przepłukać końcówkę aplikatora wodą i wysuszyć.
- Produkt stosować do każdego otworu nosowego, w zależności od potrzeb.

Sposób aplikacji produktu u dzieci:

1. Ułożyć dziecko w pozycji leżącej, przechylając jego głowę nieco w bok, by ułatwić aplikację roztworu do otworu nosowego.
 2. Rozpylić roztwór poprzez kilkukrotne naciśnięcie dozownika.
 3. Ułożyć dziecko w pozycji siedzącej i zebrać wypływającą z nosa wydzielinę.
 4. Czynność powtórzyć dla drugiego otworu nosowego.
 5. Delikatnie wytrzeć dziecku chusteczką nos, uważając by nie włożyć jej zbyt głęboko do otworu nosowego.
- Przepłukać końcówkę aplikatora wodą i wysuszyć.
Produkt stosować do każdego otworu nosowego 2–3 razy na dobę.

Ostrzeżenia:

- Ze względów higienicznych oraz aby ograniczyć rozprzestrzenianie się patogenów, produkt powinien być stosowany wyłącznie przez jedną osobę.
- Produkt nie nadaje się do dalszego stosowania po upływie trzech miesięcy od pierwszego użycia.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu i buteleczce.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze poniżej 40°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przed innymi źródłami ciepła.

Data ostatniej aktualizacji: 18.01.2018

 **Pharmalink, S.L.**
Av. Universitat Autònoma, 13
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès
BARCELONA - HISZPANIA
+34 900 102 796
www.pharmalink.es

DYSTRYBUTOR:
Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław
POLSKA
tel: 71 316 94 55
www.oleofarm.pl

