

NOSONEK

HIPERTONICZNY

**UDRAŻNIAJĄCY
SPRAY DO NOSA**
z aloesem i miętą

HIPERTONICZNY ROZTWÓR WODY MORSKIEJ NOSONEK Z ALOESEM I MIĘTĄ - SPRAY DO NOSA

Udrażniający roztwór do nosa przynoszący ulgę w stanach chorobowych charakteryzujących się zwiększoną ilością wydzieliny z nosa. Codzienne stosowanie produktu pomaga oczyścić nos oraz chroni i nawilża przewody nosowe. Hipertoniczny roztwór wody morskiej ma silne właściwości nawilżające, a dodatek aloesu wspomaga i przedłuża jego działanie. Powyższe składniki pomagają przeciwdziałać namnażaniu się drobnoustrojów w przewodach nosowych. Natomiast mięta zapewni przyjemny i świeży aromat.

Opakowanie:

Spray o pojemności 120 ml z aplikatorem do nosa.

Skład:

Woda morska, woda oczyszczona, wyciąg z aloesu, aromat miętowy.

Zalecane dawkowanie:

Dorośli i dzieci od 6. roku życia: rozpylić 1 lub 2 dawki do każdego otworu nosowego.
Produkt stosować według potrzeb.

Sposób użycia:

1. Delikatnie włożyć końcówkę aplikatora do otworu nosowego.
2. Nacisnąć dozownik.
3. Poczekać aż roztwór rozrzedzi wydzielinę, po czym wydmuchać nos.
4. Przepłukać końcówkę aplikatora wodą i wysuszyć.

Ostrzeżenia:

- Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu i buteleczce.
- Produkt w buteleczce o pojemności 120 ml nie nadaje się do dalszego stosowania po upływie trzech miesięcy od pierwszego użycia.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować produktu w razie podejrzanego lub stwierdzonego uczulenia na jakikolwiek składnik preparatu.
- Ze względów higienicznych oraz aby ograniczyć rozprzestrzenianie się patogenów produkt powinien być stosowany wyłącznie przez jedną osobę.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze poniżej 40°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przed innymi źródłami ciepła.

Data ostatniej aktualizacji: 18.04.2017

 **Pharmalink, S.L.**
Av. Universitat Autònoma, 13
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès
BARCELONA - HISZPANIA
+34 900 102 796
www.pharmalink.es

DYSTRYBUTOR:
Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław
POLSKA
tel: 71 316 94 55
www.oleofarm.pl

 0051