



WYRÓB MEDYCZNY
AKUVAX
SPRAY DO USZU

INSTRUKCJA UŻYWANIA WYROBU MEDYCZNEGO

Należy uważnie zapoznać się z całą instrukcją używania przed zastosowaniem wyrobu medycznego, ponieważ zawiera ważne informacje.

Należy zachować instrukcję używania, aby w razie potrzeby przeczytać ją ponownie.

Jeżeli wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane związane ze stosowaniem wyrobu medycznego Akuvax, należy skonsultować się z lekarzem.

Spis treści instrukcji używania:

- W jakim celu się stosuje wyrób medyczny Akuvax.
- Informacje ważne przed zastosowaniem wyrobu medycznego Akuvax.
- Jak stosować wyrób medyczny Akuvax.
- Możliwe działania niepożądane.
- Warunki przechowywania wyrobu medycznego Akuvax.
- Inne informacje.

W jakim celu się stosuje wyrób medyczny Akuvax

Wyrób medyczny Akuvax stosuje się u niemowląt powyżej 3 miesiąca życia, dzieci oraz osób dorosłych w celu usunięcia korków woskowinowych i zalegającej woskowiny przy chorobach ucha zewnętrznego oraz profilaktycznie w utrzymaniu higieny uszu i zapobieganiu powstawania korków woskowinowych.

Informacje ważne przed zastosowaniem wyrobu medycznego Akuvax

Nie należy stosować wyrobu medycznego Akuvax:

- w przypadku nadwrażliwości lub alergii na oliwę z oliwek

- w przypadku stwierdzonej lub podejrzewanej perforacji błony bębenkowej lub po operacji ucha
- w przypadku wycieku z ucha, bólu ucha, podrażnienia, wysypki w uchu lub gdy istnieją zawroty głowy
- do innych otworów ciała, na przykład do oczu, nosa lub jamy ustnej

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

U niemowląt i dzieci do 12. roku życia stosować po konsultacji z lekarzem.

Nie należy manipulować zbyt głęboko aplikatorem, aby nie uszkodzić narządu słuchu.

Ze względów higienicznych zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę.

Jak stosować wyrób medyczny Akuvax

Sposób użycia:

Przed pierwszym użyciem należy kilkanaście razy nacisnąć pompkę dozownika w celu jego napełnienia, aż do pojawienia się pierwszej pełnej dozy.

- Przed zaaplikowaniem delikatnie pociągnij górny płatek ucha lekko w górę i w kierunku tyłu głowy.
- Trzymając buteleczkę w pozycji pionowej przybliż aplikator do zewnętrznego przewodu słuchowego i naciśnij końcówkę dozującą.
- Następnie delikatnie pomasuj skrawek ucha.
- Powtórz czynność w odniesieniu do drugiego ucha.
- Po użyciu zdejmij końcówkę dozującą, optucz ją w ciepłej wodzie i wysusz, a następnie załóż na zawór dozujący.

Stosowanie:

w celu usunięcia korków woskowinowych oraz zalegającej woskowiny przy chorobach ucha zewnętrzno:

niemowlęta powyżej 3. miesiąca życia, dzieci i osoby dorosłe – 3 naciśnięcia pompki dozującej 3 razy dziennie przez 5-7 dni

profilaktyczne stosowanie wyrobu medycznego Akuvax w celu utrzymania higieny uszu oraz zapobiegania powstawania korków woskowinowych:

niemowlęta powyżej 3. miesiąca życia, dzieci i osoby dorosłe – 1-2 naciśnięcia pompki dozującej co 7 dni.

Zastosowanie większej niż zalecana porcji wyrobu medycznego Akuvax

Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować większych porcji niż zalecane.

Pominięcie zastosowania porcji wyrobu medycznego Akuvax

Nie należy stosować podwójnej porcji wyrobu medycznego w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy kontynuować stosowanie wyrobu medycznego Akuvax z zachowaniem dotychczasowego dawkowania.

Możliwe działania niepożądane

Jeżeli wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane związane ze stosowaniem wyrobu medycznego Akuvax, należy przerwać jego stosowanie oraz skonsultować się z lekarzem i poinformować o nich wytwórcę.

Każdy poważny incydent medyczny związany ze stosowaniem wyrobu medycznego Akuvax należy zgłosić wytwórcy i Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Warunki przechowywania wyrobu medycznego Akuvax

Przechowywać w temperaturze od 10°C do 25°C w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla

dzieci. Nie należy stosować wyrobu medycznego po upływie 6 miesięcy od daty pierwszego użycia.

Nie stosować wyrobu medycznego Akuvax po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu i etykiecie.

Inne informacje

Co zawiera wyrób medyczny Akuvax

Skład: oliwa z oliwek przygotowana według standardów farmaceutycznych.

Jak wygląda opakowanie wyrobu medycznego i co zawiera opakowanie?

Wyrób medyczny Akuvax zawiera butelkę plastikową zawierającą 15 ml płynu do stosowania dousznego z atomizerem.

Wielkość opakowania: 15 ml.



Oleofarm Sp. z o.o., ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław, tel. 71 316 94 55
www.oleofarm.pl



Do wyrobu dołączona jest instrukcja używania



Przechowywać w temperaturze od 10°C do 25°C



Nr serii



Termin przydatności wyrobu do używania

Data wydania instrukcji używania: 2019-02-06