

# NOSONEK

**IZOTONICZNY****SPRAY DO NOSA***dla dzieci***IZOTONICZNY ROZTWÓR WODY MORSKIEJ NOSONEK - SPRAY DO NOSA**

Opowiednia higiena nosa jest ważna dla dorosłych, dzieci i niemowląt. Zbyt duża ilość wydzieliny w jamach nosowych może prowadzić do namnażania się drobnoustrojów i nadmiernej suchości błony śluzowej nosa. Dzięki działaniu mechanicznemu, woda morska **NOSONEK** intensywnie nawilża jamę nosową i ułatwia usunięcie wydzieliny, przywracając tym samym naturalną przepuszczalność błony śluzowej nosa. Woda morska **NOSONEK** zachowuje dobroczynne właściwości naturalnej wody morskiej. Woda morska **NOSONEK** pochodzi z zatoki Cancalé w Bretanii, znanej z jakości swoich wód. Zatoka ta cechuje się wysokimi pływaniami (do 12 m) oraz silnymi prądami, zapobiegającymi zanieczyszczeniu wód. Dzięki tej wyjątkowej specyfice woda cały czas oczyszcza się i pozostaje czysta. Próbkę pobiera się automatycznie, gdy jakość wody jest optymalna (po okresie przyptywu). Obszar pobierania próbek jest obszarem klasy A i podlega stałemu monitoringowi (pod kątem mikrobiologicznym, zanieczyszczenia chemicznego, pH, fitoplanktonu itp.).

**Skład:**

Woda oczyszczona, woda morska (chlorek sodu 0,9%).

**Wskazania:**

Wodę morską **NOSONEK** należy stosować w codziennej higienie nosa u niemowląt, dzieci i dorosłych. Przynosi ulgę w dolegliwościach, takich jak: zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, obturacyjne zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok przynosowych, suchość błony śluzowej nosa oraz w chrypcie spowodowanej suchością błon śluzowych. Ponadto działa pomocniczo w otolaryngologii i pediatrii.

**Sposób użycia:**

1. Zdjąć nakładkę ochronną.
2. Delikatnie włożyć końcówkę aplikatora do otworu nosowego i nacisnąć dozownik w celu rozpylenia produktu.
3. Poczekać aż roztwór rozrzedzi wydzielinę, po czym wydmuchać nos.
4. Czynność powtórzyć dla drugiego otworu nosowego.
5. Przepłukać końcówkę aplikatora wodą i wysuszyć.
6. Nałożyć nakładkę ochronną na aplikator i pozostawić do następnego użycia. Produkt stosować według potrzeb.

**Sposób aplikacji produktu u dzieci:**

1. Ułożyć dziecko w pozycji leżącej, przechylając jego głowę nieco na bok, by ułatwić aplikację roztworu do otworu nosowego.
2. Rozpylić roztwór poprzez kilkukrotne naciśnięcie dozownika.
3. Ułożyć dziecko w pozycji siedzącej i zebrać wypływającą z nosa wydzielinę.
4. Czynność powtórzyć dla drugiego otworu nosowego.
5. Delikatnie wytrzeć dziecku chusteczką nos, uważając by nie włożyć jej zbyt głęboko do otworu nosowego.
6. Przepłukać końcówkę aplikatora wodą i wysuszyć.  
Produkt stosować do każdego otworu nosowego 2–3 razy na dobę.

**Ostrzeżenia:**

- Ze względów higienicznych oraz aby ograniczyć rozprzestrzenienie się patogenów, produkt powinien być stosowany wyłącznie przez jedną osobę.
- Produkt nie nadaje się do dalszego stosowania po upływie trzech miesięcy od pierwszego użycia.
- Nie stosować produktu po upływie daty ważności podanej na opakowaniu i buteleczce.
- Nie odnotowano żadnych działań niepożądanych przy zalecanych dawkach terapeutycznych, jeśli jednak wystąpią działania niepożądane, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Każde działanie niepożądane związane ze stosowaniem produktu należy zgłosić producentowi, dystrybutorowi i krajowemu organowi ds. zdrowia - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

**Przechowywanie:**

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
- Zużyte opakowanie (butelkę oraz nakładkę ochronną) należy umieścić w przeznaczonych do tego kontenerach.

**Opakowanie:**

Spray o pojemności 120 ml z aplikatorem do nosa.

Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2021

**Pharmalink, S.L.**  
Av. Universitat Autònoma, 13  
Parc Tecnològic del Vallès  
08290 Cerdanyola del Vallès  
BARCELONA - HISZPANIA  
+34 900 102 796  
www.pharmalink.es

**DYSTRYBUTOR:**  
**Oleofarm Sp. z o.o.**  
ul. Mokronoska 8  
52-407 Wrocław  
POLSKA  
tel: 71 316 94 55  
www.oleofarm.pl



Twoja opinia o produkcie  
pozwoli nam na rozwój.



PL0032\_120\_SOFT



0051